

防護マスク9211 N95 防護マスク9210 N95

米国規格NIOSH N95認定品



防護マスク9211 N95及び9210 N95は、3面立体構造で、保管・携帯に便利な防護マスクです。
米国規格NIOSH N95に認定された性能を有し、空気中に飛散した浮遊危険物の経口吸入リスクを軽減します。

1 マスクの準備

裏側を上



しめひもが見えるように持ちます。

2 立体状に形を作る

ノーズクリップと下面をつまむ



ノーズクリップを真ん中で2つ折りに



ノーズクリップはマスク上面内部にあります

3 片手でマスクを持つ

親指と中指で軽く持つ



ノーズクリップ側が外向きに!

マスクを持ったまま、手を返す



しめひもが下に垂れるように!

4 手を通すようにしめひもにも

2本のしめひもにも手を通す



ノーズクリップ側から手を通す

マスクにアゴを乗せる感じで!



5 マスクを着ける

頭の上を通す



指を広げ、しめひもを左右に伸ばすイメージで!

首の後ろに回す!



2本とも、首の後ろまで!

6 しめひもを正しい位置に指をかけて!

上側のしめひもに指をかけて!



上側のしめひもを頭頂部に!



しめひものねじれを修正

7 マスクを整える

マスクの上下面をつまみ、上下に引っ張る



上下の面を同時に引っ張り、マスクを整えます。



鼻やアゴが覆われるようにイメージして!

8 ノーズクリップの調整

両手の指で、鼻の形に合うようにノーズクリップを強く押し付ける!



鼻の周りからの漏れ込みを防止するために、必ず行ってください。

9 ユーザー・シール・チェック

両手でマスク全体を覆うように!



両手でマスクを表面を覆い、息を強く吹き出します。マスク周辺から空気が漏れなければOKです。
漏れる場合にはノーズクリップやマスクの位置を調整してください。

マスクの外し方

その1. 下側のしめひももから



両手の人差し指で、引っ掛けるようにして!



その2. 上側のしめひもも!
上側も同時に両手の人差し指で、引っ掛けるようにして!

防護マスクには、汚染物質が付着している可能性があります。なるべくマスク本体に触れないように注意しながら外してください。

その3. そのまま廃棄袋へ!



マスク本体に触れないように注意しながら廃棄袋へ、捨ててください。

- ・手を洗う
- ・顔を洗う
- ・うがいをする